

KryoLipolyse – der neue Fettweg-Trend

Profi-Gerät mit Kombi-Technologie



- das Gerät wird mit Konformitätsbescheinigung und CE-Zulassung geliefert
- mit Kombi-Technologie: Kühlen und Wärmen
- mit integrierter Muskel-Stimulation
- 4 große Kühlplatten
- effektive Umfang-Reduzierung
- bis zu 5 cm Eindringtiefe
- keine Minus-Temperaturen (keine Verletzungs-/Erfrierungsgefahr!)
- anwendbar an Bauch, Hüften, Beinen, Po und Armen

Gerätepreis: 24.900,00 Euro zzgl. ges. Mehrwertsteuer

Leasing-Vorschlag: Laufzeit 54 Monate, Restwert 10%

Rate: ca. 500,00 Euro zzgl. ges. Mehrwertsteuer

Lieferung: ab Werk inklusive Aufstellung und Einweisung

Das Gerät amortisiert sich bereits bei 3 – 4 Behandlungen pro Woche innerhalb von 6 Monaten.

Das Verfahren der KryoLipolyse

Unsere Fettzellen reagieren anders als andere Gewebearten, wie z. B. das Bindegewebe, auf Kälte.

Dies konnte in klinischen Studien nachgewiesen werden. Die KryoLipolyse bedient sich genau dieser Eigenschaft der Fettzellen: Mit Hilfe eines Applikators, der etwa so groß ist wie zwei Handflächen und der wie ein Saugnapf wirkt, wird ein Areal mit Haut- und Fettgewebe angesaugt. Anschließend wird ein Kältereiz ausgeübt, indem dieses Hautareal auf eine voreingestellte Temperatur heruntergekühlt wird. Damit werden die Fettzellen geschädigt. Sie durchlaufen nun einen Abbauprozess, der zwischen 2 und 4 Monaten andauert. Dies führt zu einer Reduktion der Fettzellen, die dauerhaft beseitigt werden.

Mittels Platten-Technologie können mehrere Körperstellen gleichzeitig behandelt werden. Außerdem sind Behandlungen an Partien mit geringem Fettgewebeanteil möglich, da keine große Gewebemasse eingesaugt werden muss.

Die Methode

Step 1: Kälte = Kryolipologie

Auf die zu behandelnden Körperareale (lokale Fettpartien) werden bis zu 4 Platten gelegt. In den Platten sind mittig Kühlelemente platziert, die konstant eine Temperatur von 0 bis 4 Grad Celsius abgeben. Da die Fettzellen im Vergleich zu anderen Körperzellen besonders kälteempfindlich sind, fangen diese bereits bei einer Temperatur von 5 Grad Celsius an zu kristallisieren. Ist die Kälteeinwirkung lang genug (50 – 60 Minuten), tritt der „programmierte Zelltod“ ein – die sog. Apoptose. Bis zu 30% der Fettzellen in den Behandlungsarealen können bei nur einer Behandlung reduziert werden. Das Ergebnis ist dauerhaft und endgültig. Jedoch kann der Prozess bis zu 3 Monate dauern. Um diesen Prozess zu beschleunigen, ergänzen wir das Kälteverfahren mit der elektrischen Muskelstimulation.

Step 2: Muskelstimulation = EMS

Während der gesamten Behandlung läuft zeitgleich zur Kältetherapie die elektrische Muskelstimulation (EMS). Die Elektroden werden mit der Platte verbunden und auf die Behandlungsareale gesetzt. Die EMS führt zu einer besseren Verstoffwechslung der freigesetzten Fette. Gleichzeitig fördert die EMS die Durchblutung und wirkt hautstraffend. Die Art der Signale und deren Intensität lassen sich variabel einstellen.

Die Anwendung

In jeder der 4 Platten sind beide Funktionen integriert: In flexibel einstellbaren Zeitabschnitten und Intensitätsstärken werden Kälte und Wärme auf das Hautgewebe abgegeben. Die Fettzellen reagieren in den darauffolgenden Tagen mit Selbstzerstörung (Apoptose). Andere Zellen reagieren mit einer Zunahme ihrer Aktivitäten, wie es zum Beispiel aus der Sauna bekannt ist. Die elektrische Muskelstimulation EMS unterstützt die Wirkung der Zellaktivität, stärkt die Muskulatur und erhöht zudem den Kalorienverbrauch.

Die Ergebnisse

**Fett weg-Behandlung mit COOLIPO Cryo 3S
zur Reduktion an Bauch, Hüften und Beinen:
Bauch & Hüfte bis zu 12 cm, Oberschenkel bis zu 8 cm
- innerhalb von 3 Monaten -**

	Gewicht	Fettmasse	Bauchumfang	Beinumfang
1 Sitzung/1 Woche	-1,0 kg	-0,7 kg	-2,2 cm	-1,3 cm
6 Sitzungen/6 Wochen	-4,8 kg	-4,1 kg	-7,0 cm	-3,9 cm
12 Sitzungen/12 Wochen	-8,3 kg	-7,1 kg	-9,2 cm	-5,8 cm

*Behandlungsstudie im Rahmen von 1.000 Probanden

Vorteile, die überzeugen:

Funktionen:	Kühlung und Muskelstimulation
Applikator:	4 Platten und 1 Handstück
Risiken:	leichte Rötung der Haut
Empfindung:	sanft und angenehm
Temperatur:	Platten bis 0°C, Handstück bis 10°C
sichtbare Ergebnisse:	sofort und nachwirkend
Zertifikate:	CE, KFDA
Personaleinsatz:	sehr gering
Anwendungsbereiche:	Bauch, Hüfte, Beine Po, Arme
Dauer der Anwendung:	60 Minuten